

# ММС СКРИНИНГОВ ТЕСТ ЗА НАЛИЧИЕ НА НАРКОТИК

## **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

Ползва се като вероятностен тест за определяне наличието на наркотици и прекурсори.

## **ЧУВСТВИТЕЛНОСТ:**

Тестът има следната чувствителност: LDL (долна граница на откриване) при бл. < 0,3 mg, в зависимост от чистотата на пробата.

## **СПЕЦИФИЧНОСТ:**

Наличието на наркотик се проявява като промяна на цвета.

В допълнение различни лекарства могат да произведат подобни или различни цветове.

## **СЪХРАНЕНИЕ:**

Как се съхраняват ампулите:

Срокът на годност е указан на опаковката. Ампулите трябва да бъдат предпазени от светлина.

Температура: -20°C до +57°C

## **БЕЗОПАСНОСТ:**

Съхранявайте ампулите далеч от досега на деца.

В случай, че кристалите влезат в контакт с очите, кожата или дрехите трябва да промиете засегнатата област с вода.

Забележка: Производителят/дистрибуторът не поема никаква отговорност ако тестовете са ползвани неправилно.

## **ИЗХВЪРЛЯНЕ:**

Ние препоръчваме след използването на ампулите, същите да бъдат изхвърлени в кошчето за стъклени отпадъци или в съответствие с изисванията за изхвърляне на отпадъци на страната, в която се ползват.

## **ОПАКОВКА:**

10 тест ампули, 10 шпатули, 1 инструкция

## **ВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ:**

Фромвулеви ЕООД

София 1505

ул. „Марица“ № 10

тел. (02) 9433167; (02) 9461167

факс: (02) 9433518

e-mail: [general@fromvoulevs.com](mailto:general@fromvoulevs.com)

web: [www.fromvoulevs.com](http://www.fromvoulevs.com)

Стъпка 1:



Почукайте неотворената ампула няколко пъти върху твърда повърхност така, че гранулите, които може да са полепнали по вътрешната стена на ампулата да паднат надолу.

Стъпка 2:




Хванете горната част на ампулата между палеца и показалеца и отчупете върха с приспособлението за отчупване

Стъпка 3-а:



1

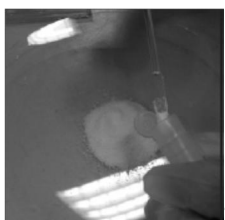

2


Използвайте шпатула, за да внесете съмнителния материал в ампулата (1) или в капачката (2)

Стъпка 3-б:



За съмнителни материали в течна форма (като GHB - гама хидроксibuтират) ние препоръчваме да използвате кръглия край на приложената шпатула или използвайте пипета и внесете една капка в ампулата.

Стъпка 4:

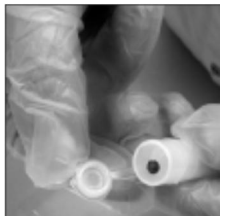

В MMC тестовете за LSD/канабис/V&R и кетамин пластмасовата капачка съдържа зрънца катализатор, които трябва да се разбъркат с кръглия край на шпатулата, след като въведете изпитвания материал


Стъпка 5:



Поставете пластмасовата капачка на горния край на ампулата

Внимание: Ако топчето, което се намира в капачката се залепи към стената, използвайте шпатулата, за да го отделите и разбъркайте.

Стъпка 6:

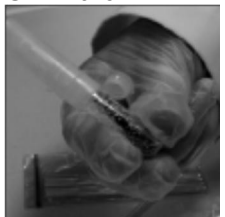

Сравнете цвета на реагента – гранулата с цвета, отпечатан върху ампулата.

Стъпка 7:



Тъй като MMC тестовете не изискват киселинен неутрализатор (тъй като това автоматично се прави в ампулата) можете да изхвърлите директно използваните ампули директно в кошчето за стъклени отпадъци.